

## INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE PARENTESCO MOLECULAR:

Para la realización de la prueba es necesario que cuente con el siguiente material:

- 1 Documento de solicitud y consentimiento informado en papel autocopiativo.
- 2 hisopos para cada una de las personas implicadas: En el caso de que fueran 3 personas interesadas necesitaría los 6 hisopos que contiene el estuche (Ej: dos para el padre y dos para el hijo/a y dos para la madre). En caso de que sean menos de tres personas deseche el resto de hisopos.
- Un par de guantes
- Sobre para el envío de la muestra con la dirección del laboratorio.

Para la realización de la prueba es necesario que siga los siguientes pasos:

**1º** Recogida de las muestras de cada una de las personas implicadas (recuerde que son necesarios 2 hisopos por persona). Es aconsejable que las personas no hayan fumado ni haya comido ni bebido media hora antes de la toma de muestra. Cada hisopo tiene que ser frotado 10 veces (arriba y abajo) en cada una de las partes internas del carrillo. Dejar secar el hisopo durante 5 min. a temperatura ambiente antes de introducirlo en su funda.

**2º** Leer y recoger las firmas de las personas implicadas en el documento de solicitud y consentimiento informado (una copia es para los interesados, otra para el centro y otra que se envía al laboratorio).

**3º** Introduzca la copia del documento de solicitud y consentimiento informado del laboratorio junto con los hisopos empleados en el estuche.

**4º** Introduzca el estuche en la bolsa de mensajería que contiene el kit y ciérrela mediante la pestaña adhesiva que contiene.


**5º** Solicite la recogida del servicio: Para ello, debe llamar al teléfono 951706532 o enviar un correo electrónico a la dirección [info@genologica.com](mailto:info@genologica.com) indicando la dirección de la recogida.

### De forma esquemática:


**1.** Para la toma de muestra es necesario el uso de guantes para evitar posible contaminación.




**2.** Cada hisopo tiene que ser frotado 10 veces (arriba y abajo) en cada una de las partes internas del carrillo.

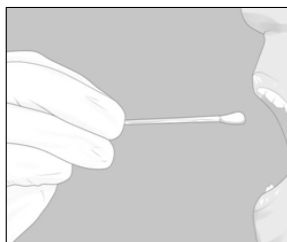


**3.** Dejar secar el hisopo durante 5 minutos a temperatura ambiente

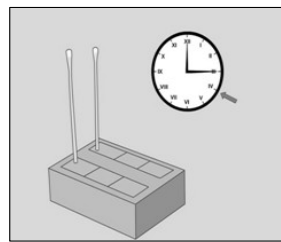


**4.** Evite colocar los hisopos de forma desordenada o que estén en contacto físico unos con otros.

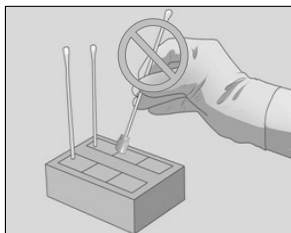

**5.** Rellene la hoja de solicitud y lean y firmen el consentimiento informado.

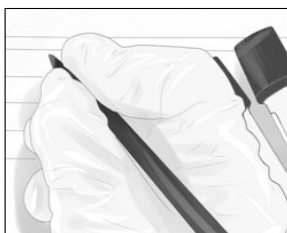

**6.** Una vez pasados los 5 minutos, introduzca los hisopos en las fundas.

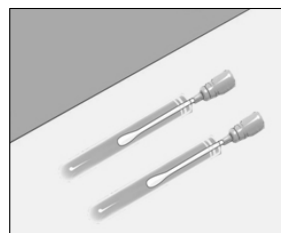

Con cualquier duda póngase en contacto con Genologica en el teléfono **951706532**. Nuestro horario es de 9 a 14 y de 16 a 18 horas.